

BioC CHX Zahnpflege



Unterstützt eine gesunde bakterielle Flora im Mund

Wann zu verwenden?

Verwenden Sie Biodent Mundpflegeprodukte mit häufigem Verzehr von Süßigkeiten.

Wie oft zu benutzen?

Verwenden Sie alle 3 Monate Biodent Chlorhexidin Lack.

Zusammensetzung

Chlorhexidin, Sandarac und Ethanol.

Benutze es nicht

Bei Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile.

www.biodent.nl • info@biodent.nl

BIODENT BV • Mollevite 19 • 6931 KE Westervoort
Nederland • T 0031 6 20143120

Gebrauchsanweisung


Tragen Sie mithilfe einer stumpfen Nadel eine dünne Schicht auf die Zahnoberflächen auf, die mit der Zahnbürste nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind. Vermeiden Sie den Kontakt des Chlorhexidin-Zahnlacks mit der Zunge. Verwenden Sie bei Anwendung des Chlorhexidin-Zahnlacks von Biodent nicht mehr als $\frac{1}{4}$ der Spritzenfüllung je Anwendung.



Auftragen auf den Zahnhals



Auftragen auf die Kauflächen

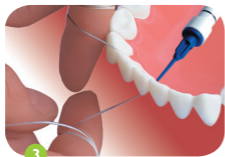

Einbringen in die Zahnzwischenräume, Benutzung von Zahnseide



5 Minuten lang nichts essen oder trinken und danach den Zahnlack mit einer Zahnbürste entfernen. Kleine Stückchen ausspucken.